



QuanoMed.docx

QUANOMED®
By Zepter Group

VITALQUANO

shop.zepter.com



„Home Art & Sales
Services AG“
Sihleggstrasse 23
8832 Wollerau,
Switzerland
(Šveicarija)

Naudotojo vadovas
Gydomasis juosmens diržas

 zepter®
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

 zepter®
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

VITALQUANO



Įvadas

Šis gydomas juosmens diržas skirtas apatinei nugaros daliai prilaikyti ir savijautai pagerinti. Jis puikiai tinka asmenims, kurie dėl ilgo sėdėjimo, stovėjimo arba fizinės veiklos jaučia diskomfortą ar skausmą.

Indikacijos

„VitalQuano“ pirmiausia naudojamas juosmeninei nugaros daliai prilaikyti ir stabilizuoti. Jis gali būti naudingas esant toliau nurodytoms indikacijoms.

- **Lėtiniai juosmens skausmai** – diržas gali padėti numalšinti skausmą, nes jį naudojant suteikiama išorinė atrama raumenims ir taip sumažinama stuburui tenkanti įtampa.
- **Raumenų silpnumas** – diržas prilaiko nugaros raumenis, ypač užsiimant veikla, dėl kurios apatinė nugaros dalis įtempiama.
- **Atsigavimas po traumos** – po nugaros traumos dėvimas diržas „VitalQuano“ gali padėti išvengti tolesnių pažeidimų ir skatinti gijimą, nes jį nešiojant apribojami judesiai.

Produkto aprašymas

- **Medžiaga** – aukštos kokybės orui laidus audinys ir patvarūs dirželiai.
- **Matmenys:** modelis **QVB-110** – 110 cm ilgio; modelis **QVB-140** – 140 cm ilgio.
- **Ypatybės** – reguliuojami lipukai leidžia pritaikyti diržą pagal asmeninius poreikius, lanksti vidinė dalis užtikrina optimalią atramą, o kontūrinė forma prisitaiko prie natūralių kūno linijų.

Naudojimas

1. **Raskite priekinę dalį.** Priekinė diržo dalis paprastai būna pažymėta ir jos danga yra lygesnė.
2. **Apsijuoskite diržu.** Apjuoskite diržu juosmenį ir įsitinkinkite, kad jo padėtis tinkama.
3. **Užsekite lipukus.** Sureguliuokite diržą taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas prilaikymas.
4. **Įsitinkinkite, ar patogiu.** Diržas turėtų būti patogiai priguldęs ir nevaržyti judesį.
5. **Jei reikia, pareguliuokite.** Prireikus, per dieną pakartotinai pasireguliuokite diržą.

Diržo priežiūra

Gydomąjį diržą „VitalQuano“ galima skalbti skalbyklėje 30 °C temperatūroje. Prieš skalbdami užsekite lipukus. Nenaudokite agresyvaus skalbiklio. Kad diržas nesusidėvėtų, jo nelyginkite.

- Palikite diržą išdžiūti ore, kad jo nesugadintumėte.
- Nebalinkite ir nelyginkite diržo.
- Laikykite diržą vėsioje ir sausoje vietoje.

Problemos ir jų sprendimas

- Diržas „VitalQuano“ **per ankštas** – atlaisvinkite dirželius.
- Diržas „VitalQuano“ **per laisvas** – įtempkite ir sutvirtinkite lipukais.
- Diržas „VitalQuano“ **nepatogus** – patikrinkite, ar tinkama diržo padėtis, ir, jei reikia, pareguliuokite dirželius.

Garantijos informacija

Gydomajam diržui „VitalQuano“ suteikiame 2 (dvejų) metų garantiją.

Atitiktis teisės aktų reikalavimams

Šis gaminytis laikomas 1 klasės medicinos priemone ir atitinka galiojančius Europos standartus.



„CEM S.r.l.“
Via della Fattoria, 4
59100 Prato

